



Detro CID Enzym – Enzymatic and disinfectant

Enzymatic cleaner and disinfectant
for medical instrument and endoscopes

วิธีการใช้งาน

น้ำยาล้างทำความสะอาดและทำลายเชื้อเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดและกล้องส่องทางการแพทย์ในขั้นตอนเดียว สามารถเข้ากันได้ดีกับเครื่องมือแพทย์ที่ทำจาก polystyrene, stainless steel, PVC, acrylic material, polycarbon, ceramic, ABS, silicone, HDPE, rubber และ glass น้ำยาสูตรเข้มข้นผสมเพียง 0.5% (5 มล. ต่อน้ำ 1 ลิตร) ล้างขัดคราบอย่างได้ผล และให้ความมั่นใจระหว่างการทำทำความสะอาด ด้วยส่วนผสมสารทำลายเชื้อ ช่วยป้องกันและลดโอกาสการแพร่เชื้อระหว่างล้างเครื่องมือหากเกิดอุบัติเหตุ แช่เพียง 15 นาที เพื่อการออกฤทธิ์ bactericidal, fungicidal, virucidal , tuberculocidal ทั้งนี้ควรนำเครื่องมือไปทำลายเชื้อขั้นสูงหรือทำให้ปราศจากเชื้อต่อไป

- ✓ น้ำยาสูตรเข้มข้น
- ✓ ล้างและทำลายเชื้อในขั้นตอนเดียว
- ✓ ผสมเอนไซม์ช่วยขจัดคราบเลือด โปรตีน สารคัดหลั่งต่างๆได้ดี
- ✓ ใช้ได้ทั้งการล้างด้วยมือและด้วยเครื่องอัลตราโซนิค
- ✓ ปราศจาก Aldehyde and phenol
- ✓ มีสารป้องกันการกัดกร่อน
- ✓ Bactericidal, fungicidal, virucidal, tuberculocidal ใน 15 นาที

Product Code	Description and Size
101957518	Detro Cid Enzym 5 liter

