



Detro Lube – Lubricant Spray

Oiling Spray for Surgical Instruments
and Air Exhausters

วิธีการใช้งาน

Usages:

Use in Surgical Hand Instruments: สเปรย์ Detro Lube Spray โดยไม่ต้องใช้ท่อต่อ โดยมีระยะห่างเล็กน้อยลงบนพื้นผิวเครื่องมือผ่าตัดที่ทำความสะอาดแล้ว ไล่ท่อต่อเพื่อฉีดหากต้องการหล่อลื่นข้อต่อต่างๆ ฉีดสเปรย์ให้ทั่วถึง ก่อนนำไปทำให้ปราศจากเชื้อตามขั้นตอนปกติ Use in Endoscopes and Exhauster Heads: ไล่ท่อต่อและฉีดบริเวณ toothed parts และข้อต่อต่างๆให้ทั่ว ทดสอบว่าข้อต่อต่างๆหมุนได้ดีก่อนนำไปใช้งาน

Usage areas:

ใช้เคลือบถนอมและหล่อลื่นข้อต่อเครื่องมือผ่าตัดเครื่องมือทันตกรรม เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อป้องกันการสึกกร่อนและ การฟีดหรือติดขัดของข้อต่อ

Product properties:

น้ำยาพร้อมใช้ชนิดสเปรย์
ป้องกันการเกิดคราบจากความร้อน ปฏิกิริยาเคมี เช่น คราบสนิมไออน้ำ คราบจากน้ำยา คราบจากโปรตีน
ช่วยให้เครื่องมือดูใหม่ ไม่หมอง
ช่วยไม่ให้คราบวัสดุต่างๆติดฝังแน่นบนเครื่องมือ
ช่วยหล่อลื่นและป้องกันการคราบสกปรกบนข้อต่อ ลูกปืน ข้อหมุนต่างๆ
ไม่มีส่วนผสมของ ซิลิโคน ไม่กระทบกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ
มีส่วนผสมของ high-heat (200°C) resistant medical paraffin oils.

Composition:

Medical white paraffin oil, butane

