



Power Quick – Multi-Purpose Enzyme Cleaner

Medical Device Enzymatic Detergent

วิธีการใช้งาน

น้ำยาเอนไซม์ล้างเครื่องมือแพทย์เอนกประสงค์ (Medical Device Enzymatic Detergent)

ผลิตจากญี่ปุ่น เหมาะสำหรับใช้ล้างเครื่องมือแพทย์ทั่วไป น้ำยามีคุณสมบัติเป็นด่างอ่อนไม่กัดกร่อนเครื่องมือและช่วยเสริม

ประสิทธิภาพการล้างน้ำยา Low foaming multi – purpose formulation ใช้ล้างได้ทุกแบบทั้งการล้างด้วย

เครื่องล้างอัตโนมัติ การล้างด้วยมือ การใช้แช่ก่อนล้าง และการล้างด้วยเครื่องอัลตราโซนิค ทำให้ประหยัดไม่ต้อง

สต็อกน้ำยาหลายชนิด อัตราส่วนผสมน้อย เพียง 0.2 – 0.5% (20 ml ต่อน้ำ 10 ลิตร)

- ✓ Enzymatic detergent
สลายคราบอย่างมีประสิทธิภาพ
- ✓ มีความเป็นด่างอ่อน
ล้างได้สะอาด แช่และล้าง
ได้โดยไม่กัดกร่อนเครื่องมือ
- ✓ ใช้ล้างได้ทั้งแบบ Manual
เครื่องล้างอัตโนมัติและ
เครื่องล้าง Ultrasonic
- ✓ สูตรฟองน้อย
ล้างออกง่าย ไม่ทิ้งสารตกค้าง

Product Code	Description and Size
100891583	PQ MULTI-PURPOSE ENZYME CLEANER 4 L

